

尿検体スライド塗抹装置

鏡検で見やすい
塗抹方式を採用！

Print Dry Workstation

PW-6500



- スライドガラスへの尿検体塗抹と熱固定を自動化
- 尿検体 10～20 μ L を薄く伸ばすように分注。鏡検で見やすい！
- 乾燥レーンでの熱固定後、染色籠へ自動で収納
- スライドガラスへのバーコード印字機能搭載
- エアロゾルによるコンタミ防止用ドラフト搭載



PW-6500

尿検体スライド塗抹装置

- 検体用スピッツ管 蓋開閉機能
- 検体攪拌機能
- 尿検体塗抹：10～20 μ Lを薄く伸ばすように分注＝鏡検で見やすい！
- エアロゾルによるコンタミ防止用ドラフト（排気）機能（検体攪拌部、検体塗抹部、チップ廃棄部）
- 検体液面検知機能、検体分注確認機能
- ヒーター搭載の搬送レーンで塗抹検体を熱固定後、染色籠へ自動収納
- スライドガラスへのバーコード印字機能

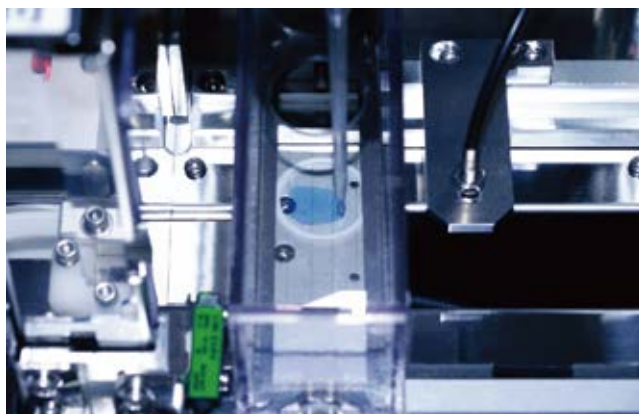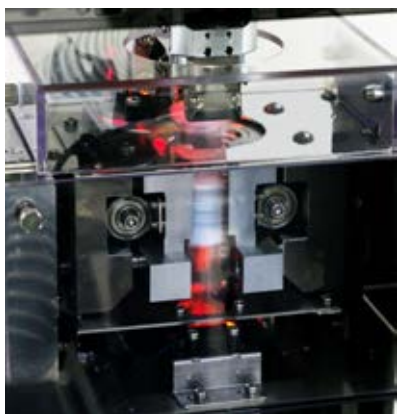

仕様

外形寸法	W1,225 × D1,190 × H1,770mm（パトライト除く）
重量	約 450kg
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	約 600VA
外部通信	USB2.0 1ポート / LAN 1ポート
検体架設数	検体用スピッツ管（ Φ 16×105mm）最大 100本
スライドガラス供給	スライドガラス 100枚用スタッカー ×1 台架設
スライドガラス収納	スライドガラス 60枚収納染色籠 ×2 台架設
チップラック	ロングチップ 90本立てラック ×2 台架設
スライドガラス乾燥	設定温度：装置内温度～100℃
スライドガラス印字	インクジェットプリンター
その他搭載機構	検体攪拌用ボルテックス、検体 / スライドガラス用バーコードリーダー、UV 殺菌灯
処理能力	約 25秒 / 検体（尿検体塗抹工程）



臨床検査・理化学機器 開発・製造・販売

メディカテック株式会社

本社・工場 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28
Tel: 048-997-2305 Fax: 048-996-6968

東京営業所 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬1丁目11-8
Tel: 048-994-3450 Fax: 048-994-3452

大阪営業所 〒532-0011 大阪市淀川区西中島3-11-24
新大阪11山よしビル 7F
Tel: 06-6195-1207 Fax: 06-6195-1208

WebHP <http://www.medicattec.co.jp/>



ISO 9001 12QR-1646
ISO 13485 12MR-007