

# フィルム式 採血管開栓機

**NEW**

Medicatec Film Cap Opener

**MCO-7510**

**電源不要!!**

採血管のフィルム栓を  
10本まとめて開栓

クロスコンタミ防止設計

※開栓ヘッド部刃はリユーザブルです

● **かんたん操作**

● **コンパクト設計**

● **清潔な作業環境**



# フィルム式採血管開栓機

- 電源不要で誰でも簡単に採血管のフィルム栓を10本まとめて開栓できます。
- ガイドバーの設置によりクロスコンタミを防止する設計です。\*開栓ヘッド部刃はリユーズブルです。
- コンパクト設計 (W)327mm×(D)337mm×(H)350mm
- お客様ご利用の検体チューブ・ラックに対応した開栓機の製作も可能です。


**10本セット!**



**レバーを押し下げるだけ!**



**あっという間に開栓!**

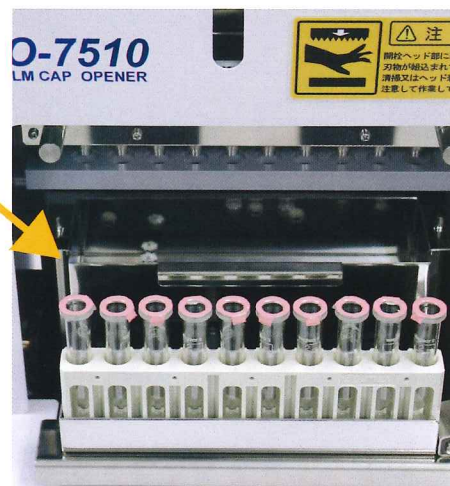

**フィルム栓は  
回収箱に落ちます!**



### ◆仕様

品名	フィルム式採血管開栓機
形式	MCO-7510
使用採血管	テルモ社製ベノジェクトII 真空採血管 φ13.2mm×78mm
使用ラック	シスメックス社製10本ラック
重量	約16kg
寸法	W327mm×D337mm×H350mm

※本製品にテルモ社製採血管、シスメックス社製ラックは付属しません。



### キャリアオーバーについての注意

本品はその構造上、複数検体連続開栓時にキャリアオーバー（コンタミネーション）が起きる可能性があり、検査値に影響を与えることが予想されます。そのため、特に免疫血清学的検査を実施する検体には、絶対に使用しないでください。

■本仕様は製品改良のため、予告なく変更することがあります。



臨床検査・理化学機器 開発・製造・販売

**メディカテック株式会社**

<http://www.medicatec.co.jp/>

本社・工場 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目11-28 ☎048(997)2305(代) FAX.048(996)6968  
 営業所 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬863-1 ☎048(994)3450 FAX.048(994)3452  
 サービスセンター 〒340-0816 埼玉県八潮市中央1丁目12-13 ☎048(997)2348



取扱販売店